


COVID-19 IgG/IgM RAPID TEST

Test rapido per la rilevazione qualitativa di anticorpi IgG e IgM contro COVID-19 in campioni di sangue intero umano, siero e plasma. Solo per uso diagnostico professionale in vitro.

PRIMA[®]
PROFESSIONAL



Risultato in 10 minuti

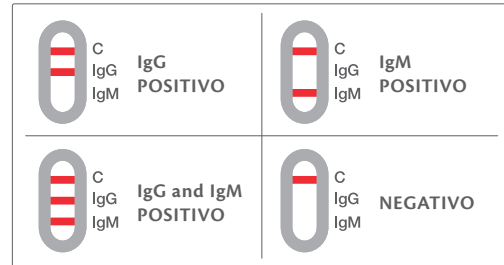

Test your health



COVID-19

Nel dicembre 2019 è stato segnalato a Wuhan (Provincia di Hubei, Cina) un focolaio di polmoniti di eziologia sconosciuta. Ad inizio di gennaio 2020 un nuovo coronavirus, denominato SARS-CoV-2 (Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2), appartenente al genere β , è stato identificato come l'agente infettivo che ha causato questa prima epidemia e la patologia associata è stata definita COVID-19 (Coronavirus Disease 2019). Il periodo di incubazione è tra 1 e 14 giorni, con prevalenza tra 3 e 7 giorni. I sintomi più comuni sono febbre, stanchezza, tosse, perdita dell'olfatto e del gusto, difficoltà respiratorie ma in alcuni casi vengono riportati anche congestione nasale, mal di gola, mialgia e diarrea. Nei casi più gravi l'infezione causa polmonite, sindrome respiratoria acuta grave, insufficienza renale e persino morte. Le raccomandazioni generali per prevenire la diffusione dell'infezione includono il lavaggio regolare delle mani, la copertura della bocca e del naso quando si tossisce e si starnutisce, evitare il contatto ravvicinato con chiunque mostri sintomi di malattie respiratorie come tosse e starnuti.

PRINCIPIO DEL TEST

Il COVID-19 IgG/IgM Rapid Test è un test rapido immunocromatografico a flusso laterale per la rilevazione qualitativa degli anticorpi IgG e IgM contro SARS-CoV-2 in campioni di sangue intero, siero o plasma umano.

PERCHÉ UTILIZZARE IL TEST - BENEFICI

- Assistere i dottori nella diagnosi di COVID-19:
- Elevata Sensibilità e Specificità;
 - Test rapido (10 minuti);
 - Di facile utilizzo e interpretazione;
 - Sicuro e affidabile.

COME UTILIZZARLO

1) Per sangue intero (prelievo digitale e venoso): riempire la pipetta e trasferire 20 μ L di campione di sangue intero nel pozzetto del campione (S) della cassetta. In alternativa alla pipetta i 20 μ L di campione proveniente da prelievo venoso possono essere dispensati con una micropipetta da laboratorio.

Per siero e plasma: trasferire 10 μ L di campione nel pozzetto del campione (S) con una micropipetta da laboratorio.

UTILIZZATORI FINALI

Il COVID-19 IgG/IgM Rapid Test è destinato ad essere utilizzato da professionisti sanitari per la diagnosi di COVID-19.


SPECIFICHE TECNICHE

Il COVID-19 IgG/IgM Rapid Test è stato valutato presso l'Ospedale Luigi Sacco, il Policlinico di Milano, il Policlinico di Monza, l'Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri e l'Ospedale San Raffaele Turro, confrontandolo contro un test molecolare PCR di riferimento. I risultati ottenuti con campioni raccolti da pazienti positivi alla PCR dopo più di 11 giorni dalla comparsa dei sintomi mostrano elevati valori, tra i quali: Sensibilità: 100%; Specificità: 99.2% per IgG³. I risultati combinati su 550 campioni per le IgG e IgM sono riportati nella tabella sottostante.


Risultati combinati IgG/IgM	SPECIFICITÀ	SENSIBILITÀ	ACCURATEZZA
	97.8%	95.7%	97.3%
	(95% CI: 96.4%-99.2%)	(95% CI: 92.3%-99.1%)	(95% CI: 95.9%-98.6%)

BIBLIOGRAFIA

1. Weiss SR, Leibowitz JL. Coronavirus pathogenesis. *Adv Virus Res* 2011; 81:85-164. PMID:22094080 DOI: 10.1016/B978-0-12-385885-6.00009-2
2. Su S, Wong G, Shi W, et al. Epidemiology, genetic recombination, and pathogenesis of coronaviruses. *Trends Microbiol* 2016; 24:490-502. PMID:27012512 DOI: 10.1016/j.tim.2016.03.003
3. Valenti L et al. SARS-CoV-2 seroprevalence trends in healthy blood donors during the COVID-19 Milan outbreak. Submitted to *Eurosurveillance*, 2020, medRxiv preprint doi: <https://doi.org/10.1101/2020.05.11.20098442>

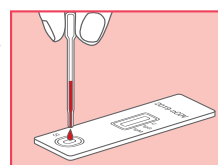

2) Aggiungere 2 gocce di buffer (circa 80 μ L). Leggere i risultati a 10 minuti.

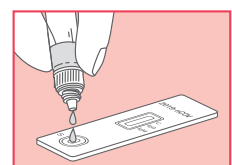



Novità Gel Detergente Mani

Formulazione Efficace e Bilanciata




Formati

500ml

100ml

Caratteristiche di Prodotto

- Categoria: **Cosmetico**
- Forma: **Gel trasparente**
- **Asciuga** in pochi secondi
- **Non lascia odori sgradevoli**
- **65%** di composizione alcolica*
- Arricchito con **Estratto di Timo**, con proprietà anti-batteriche;
- Arricchito con **Glicerina**.

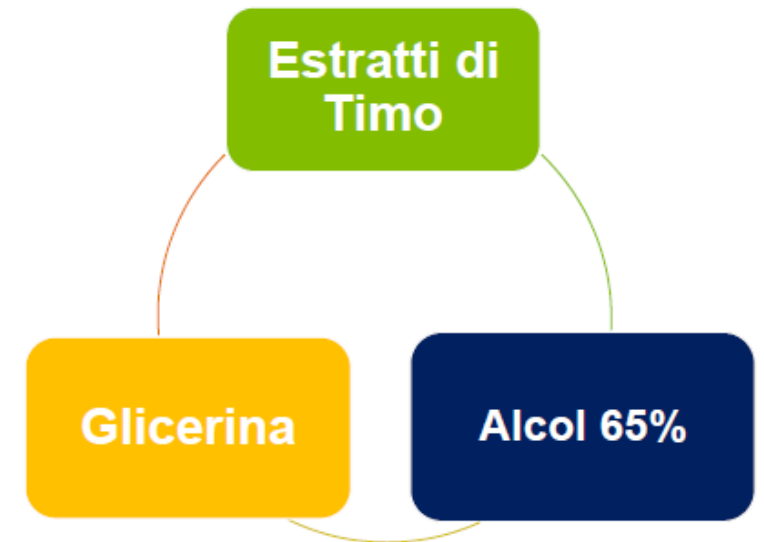

* Il Centro di Eccellenza Mylan di Monza certifica l'efficacia di Clinogel secondo le linee guida OMS, ISS e le linee guida riviste dal Ministero della Salute.

Prodotto	Costo €		Risparmio	
	prezzo normale	prezzo in convenzione	risparmio in €	percentuale
<i>Test Rapidi sierologici per il dosaggio delle IgG e IgM anti Sars-Covid 19</i>	7,14	6,4	0,74	10%
<i>Clinogel 500 ml Gel a concentrazione alcolica pari al 65% igiene rapida delle mani senza bisogno di risciacquare</i>	5,11	4,6	0,51	10%
<i>Clinogel 100 ml Gel a concentrazione alcolica pari al 65% igiene rapida delle mani senza bisogno di risciacquare</i>	1,87	1,74	0,13	7%